

PRIMAX Ultraschall Gel

Anwendungsbereiche:

Ultraschallgel ist ein Kontaktmittel zur äußerlichen Anwendung bei Ultraschalluntersuchungen bestimmt und kann in der therapeutischen und diagnostischen Medizin eingesetzt werden.

Anwendungshinweise:

Produkt direkt auf die Hautstelle auftragen. Die dazu benötigte Menge ist von der Größe der Hautfläche abhängig. Bereits geringen Mengen genügen, um ein ausgezeichnetes kontinuierliches Übertragen von Ultraschallwellen zu erreichen. Ultraschallgel ist ein wässriges Produkt, daher ist bei der Anwendung nur ein minimaler Andruck erforderlich, um den Kontakt des Schallkopfes aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss der Anwendung kann das Gel durch Abwischen mittels Papiertüchern entfernt werden.

Angaben zum Gel:

Das Ultraschallgel ist hochviskos, nicht tropfend; bietet sehr gute Benetzung der Haut und akustische korrekte Übertragung. Geeignet für die breiten Frequenzbereiche, die heute bei medizinischen Ultraschallverfahren Anwendung finden. Die akustischen Parameter wurden durch ein unabhängiges Labor geprüft.

Das Gel bietet höchste Eindringtiefe und geringstmögliche Eigenreflexion, weil es unter Vakuum mikrobblasenfrei hergestellt ist.

Das Gel ist nach den dermatologischen Untersuchungen hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen. Die Konservierungsmittelkonzentration wurde mittels Prüfungen auf ausreichende Konservierung auf ein Minimum reduziert und das Konservierungsmittel ist formaldehydfrei. Das auf Wasser Basis hergestellte Produkt ist fettfrei und pH-hautneutral.

Verpackungsausführung:

Alle Verpackungen sind aus recycle fähigem und nach Gebrauch noch vielseitig verwertbarem Polyethylen bzw. Wellpappe gefertigt. Die verwendeten Flaschen (250 ml, 1 Liter) können sehr leicht aus den Vorratsbehältern (5 Liter Cubitainer) nachgefüllt werden.

Zur Prüfung der Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen der Verpackung wurde das Produkt auf ausreichende Konservierung getestet. Das Produkt Ultraschallgel hat 12 Monate nach Anbruch der Verpackung eine ausreichende bakterizide sowie fungizide Wirkung im Sinne der Pharm. Eur..

Wir empfehlen eine Verwendung bis zu einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Öffnen. Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der Primax Berlin GmbH und der zuständigen Behörde.